



Taladro manual

Instrucciones de uso

V2 junio de 2025

Información importante

Léala antes del uso

Indicaciones:

El taladro manual Delta está indicado cuando se necesita perforar, junto con una broca adecuada (no suministrada).

Contraindicaciones:

Este dispositivo no se ha diseñado, no se vende ni está previsto para ningún otro uso que no sea el indicado.

Complicaciones:

La broca puede aflojarse en el mandril. Asegúrese de que el mandril esté bien apretado antes de proceder al uso.

Precauciones:

Para evitar que la broca se deslice, gírela lentamente hasta que esté totalmente acoplada.

Descripción:

Taladro manual Delta D-5001-CM.

Esterilidad:

El taladro manual Delta está previsto para un solo uso; no lo reesterilice.

Fabricante



Name: Shenzhen Ruixie Industrial Co. Ltd.

Address: East Side, 1/F., No.1 Building, Hengguan Industry Zone, Xinqiao Shajing, Baoan, Shenzhen, China

Representante europeo



Name: MedPath GmbH

Address: Mies-van-der-Rohe Strabe 8, Munich, 80807 DE



Taladro manual
Instrucciones de uso



+44 (0)1782 637009



sales@deltasurgical.co.uk

Precaución

Lea todas las instrucciones antes del uso

Este producto es para un solo uso; no lo reutilice.

- No utilice el dispositivo si el embalaje interior o el producto están dañados
- No utilice este producto después de la fecha de caducidad
- Utilice únicamente brocas autorizadas*
- Este es un producto sanitario. Los usuarios deben asegurarse de disponer de la experiencia y la formación clínica pertinentes antes del uso
- Lea y comprenda las instrucciones antes de usar este taladro manual desechable*
- Antes de cada uso, haga funcionar el dispositivo girando el mango y el mandril hacia la derecha y hacia la izquierda, respectivamente, e inspeccione cada componente para comprobar si presenta daños. NO utilice ningún componente si detecta la presencia de daños*
- No aplique una presión excesiva; deje que la broca gire libremente*
- Es importante emplear una velocidad de rotación adecuada para la intervención quirúrgica. Gire el mango con cuidado y lentamente
- Tras instalar la broca, inspecciónela y asegúrese de que esté bien sujeta antes de utilizar el taladro manual
- Deseche el taladro manual usado de acuerdo con las leyes y los reglamentos sobre el método de eliminación de residuos médicos. De lo contrario, podrían producirse contaminación medioambiental y lesiones a seres humanos

***Si se hace caso omiso de estas instrucciones, podrían producirse lesiones al paciente o al personal sanitario.**

Lea ambas caras de estas instrucciones

Instrucciones de uso

- 1** Lleve a cabo todos los procedimientos de acuerdo con las técnicas y los protocolos clínicos estipulados.
- 2** Fijación del mango: Despliegue el brazo del mango y bloquéelo en la posición abierta. Compruebe que el mango esté bien sujeto (consulte la figura A).
- 3** Selección e instalación de la broca: Seleccione la broca adecuada para la intervención e insértela en el mandril según se muestra en la figura B.
NOTA: Para ensanchar el mandril para adaptarlo al diámetro de la broca, gírelo hacia la izquierda.
- 4** Fijación de la broca: Apriete la broca con la llave de mandril suministrada para asegurarse de que esté bien colocada en su sitio. Aplique una presión uniforme girando la llave de mandril hacia la derecha en los tres puntos designados, asegurándose de obtener una alineación precisa (consulte la figura C).
- 5** Verificación de la alineación de la broca: Gire el mango hacia la derecha y hacia la izquierda para confirmar que la broca esté alineada correctamente y gire sin desviación. Si se detecta alguna desalineación, afloje el mandril y vuelva a fijar la broca siguiendo los pasos anteriores.
Nota: Para retirar la broca, repita el procedimiento anterior, girando el mandril hacia la izquierda.
- 6** Configuración del procedimiento finalizada: La broca está correctamente configurada y lista para la intervención.





Lea ambas caras de estas instrucciones

Información adicional

Contraindicación: N/D. Vida útil: Consulte el etiquetado del producto.

Almacenamiento y transporte: Asegúrese de que el producto se almacene en un entorno limpio y seco, y de que no esté expuesto a la luz solar directa.

Guía de símbolos

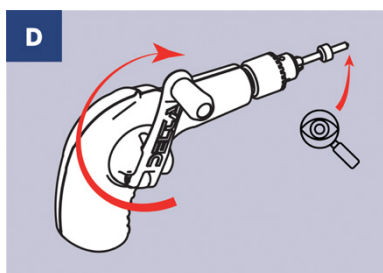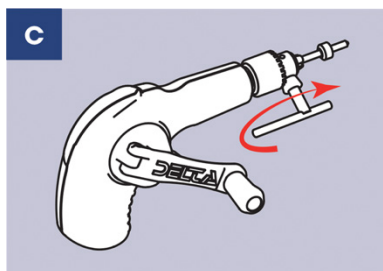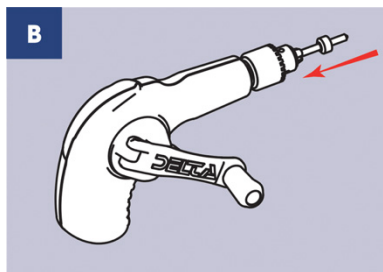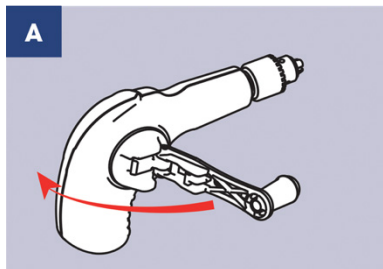

Fabricante



Fecha de fabricación



Distribuidor



Fecha de caducidad



No reutilizar



No utilizar si el embalaje
está dañado



Mantener alejado de la luz solar



Mantener seco



Código de lote



Número de nuevo pedido



Representante autorizado en la
Comunidad Europea



Marcado CE



Indica que el artículo es un
producto sanitario



Indica un soporte que contiene un
identificador de dispositivo único



Precaución



Indica un producto sanitario que no
se ha sometido a un proceso de
esterilización



Consultar las instrucciones de uso